

# STANDARD F COVID-19 Ag FIA

## VERKORTE HANDLEIDING voor STANDARD F2400 Analyzer

Distributie Nederland:

**MEDIPHOS**  
MEDICAL SUPPLIES  
info@mediphos.com  
www.mediphos.com Industrieweg 12-B, 6871 KA Renkum (NL), tel: +31 317 351838

Distribution Belgium - Luxembourg:

**MEDIPHOS**  
DIAGNOSTICS BELUX  
info@mediphos.be  
www.mediphos.be Industrieweg 12-B, 6871 KA Renkum (NL), tel: +31 317 351838

**SD BIOSENSOR**

REF **F-NCOV-01G**

IVD For in vitro diagnostic use



FL41COV3ENR2 1 Uitgiftedatum: 2020.09 Bestudeer de gebruiksaanwijzing en gebruikershandleiding grondig voordat u de beknop-te instructies gebruikt. Dit is geen volledige gebruiksaanwijzing.


### Opslag en stabiliteit

Bewaar de kit bij 2-30°C. De kit mag niet ingevroren worden of in direct zonlicht geplaatst worden.

## MONSTER EXTRACTIE


### Nasopharyngeal swab:

- Plaats de swab in een extractie buffer tube. Knijp in de buffer tube en draai de swab vaker dan 5 keer rond.
- Verwijder de swab door de swab omhoog te halen en te knijpen in de tube om zo de vloeistof uit de swab te drukken.
- Druk de nozzle dop stevig op de tube.

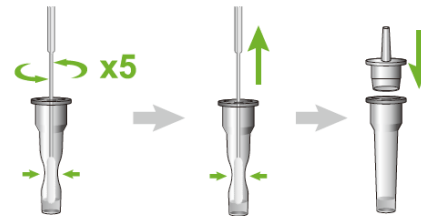

### Virus transport medium:

- Verzamel 350 µl virus transportmedium met behulp van een micropipet.
- Voeg 350 µl monster van het virus transportmedium toe aan de extractiebuffer tube en druk de dop stevig op de tube.


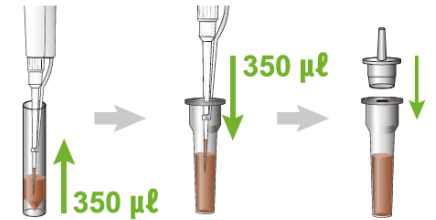


De violette lijn op het membraan van een ongebruikte test zal verdwijnen na gebruik.



## 'STANDARD TEST' Procedure

Neem de test uit het zakje en plaats deze op een vlakke en droge ondergrond. Schrijf patiënt ID informatie op het witte vlakje op de test.


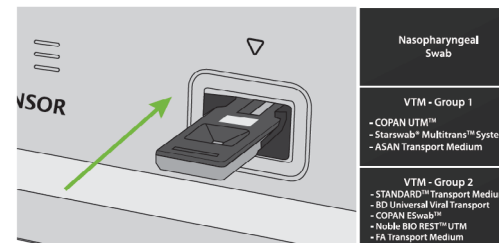
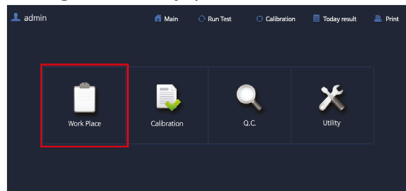


- Kies de volgende stappen op de F2400 - 'standard test' mode - Workplace - Run test

- Vul de patient ID in door het scannen met de barcode scanner of met het toetsenbord - Vul de operator ID eventueel in

- Plaats de test in de gleuf van het apparaat. Kies een monstertype. Het testresultaat wordt direct getoond na de keuze van het monstertype.

- Druppel 4 druppels van het monster in het welletje op de test.

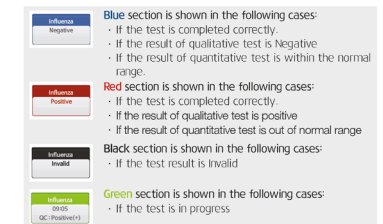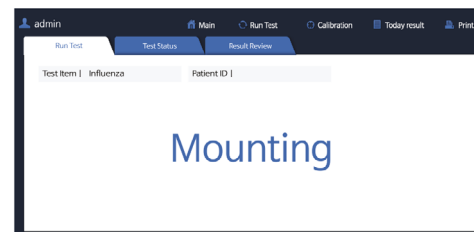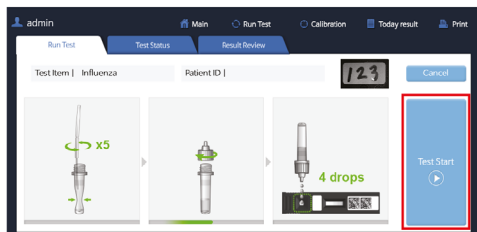

- Druk direct na het toevoegen van het monster op de Test Start knop.

- Wanneer de monstercontrole is voltooid, is de test vergrendeld in de Analyzer. Wanneer "mounting" heeft plaats gevonden kan een volgende testprocedure worden gestart.

- De analyzer geeft automatisch het resultaat weer na 30 minuten.

- Het menu "Teststatus" toont de voortgang van de test in de Analyzer.